

aponorm® Basis Control PLUS OFFIZIN SCHNELLSTART

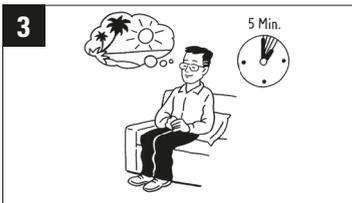
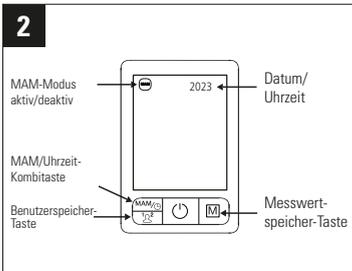
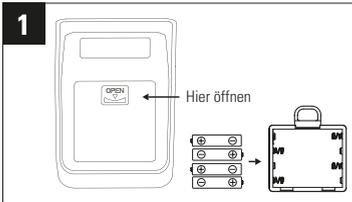


Bild 1: Legen Sie zuerst die vier mitgelieferten Batterien in das Batteriefach auf der Geräte-Rückseite ein. Achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polungs-Ausrichtung.

Stellen Sie nun zunächst das Datum und die Uhrzeit ein: Mit Hilfe der **M**-Taste können Sie jeweils zwischen den Jahren/Monaten/Tagen/Stunden/Minuten (in dieser Reihenfolge) wählen. Mit der **MAM** / \odot -Taste bestätigen Sie Ihre jeweilige Auswahl.

Bild 2: Nach Abschluss der Uhrzeit/Datumseinrichtung legen Sie durch kurzes Drücken der **MAM** / \odot Taste fest, ob Sie eine Einfach- (Display OHNE MAM-Symbol) oder Dreifachmessung (Display MIT MAM-Symbol) vornehmen wollen. Für die Abrechnung als pharmazeutische Dienstleistung (pDL) wählen Sie bitte eine Dreifachmessung aus.

Wählen Sie durch Tippen auf die Ω^2 -Taste aus, welchen Benutzerspeicher Sie nutzen möchten.

Wir empfehlen z. B.:

- ▶ Benutzerspeicher 1 für Messungen zu nutzen, die als Dreifachmessung durchgeführt werden.
- ▶ Benutzerspeicher 2 für Messungen zu wählen, die als Einfachmessung durchgeführt werden.

Bild 3: Fragen Sie nun potentiell einschränkende Faktoren (z. B. Rauchen), Vorerkrankungen, Medikamente und familiäre Vorbelastungen bei Ihrem Kunden ab. Nutzen Sie hierfür z. B. den ABDA-Informationsbogen (Download im Mitgliederbereich unter www.abda.de).

Lassen Sie Ihren Kunden im Anschluss an das Anamnesegegespräch bitte mind. 5 Minuten entspannen, bevor Sie die Messung starten.

Ermitteln Sie die Manschettengröße des Kunden (z. B. mit dem aponorm® Manschettenmaßband) und schließen Sie die passende Manschette über die Buchse auf der linken Seite des Messgeräts an.

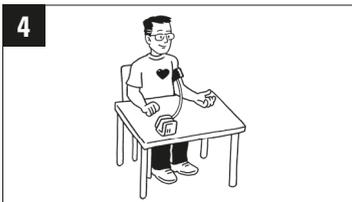


Bild 4: Beachten Sie bei Anlage der Manschette sowie Messdurchführung alle Richtlinien für eine Apotheken-Blutdruckmessung, um valide Messwerte zu erhalten (Download im Mitgliederbereich unter www.abda.de).

Starten Sie den Messvorgang durch Tippen der **☺-Taste (Bild 6)**. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kunde während der Messung (und bei einer Dreifachmessung auch in den Pausen dazwischen) möglichst ruhig sitzen bleibt, denn Bewegung, Sprechen oder allgemeine Unruhe können das Messergebnis verfälschen.



Bild 5: Wenn Sie eine Dreifachmessung gewählt haben, geht das Gerät zwischen den Messungen automatisch in einen Pausen-Countdown von 60 Sek. über, erkennbar am **☺-Symbol**. Nach Ablauf des Pausenintervalls startet direkt die nächste Messung.

Nach drei erfolgreichen Messungen wird Ihnen der errechnete Mittelwert für Blutdruck und Puls aus 2. und 3. Messung angezeigt (1. Messung wird verworfen). Notieren Sie den Wert auf dem Dokumentationsbogen und vermerken Sie, wenn während der Messung(en) Pulsanomalien aufgezeichnet wurden **⚡**.

Bild 6: Drücken Sie auf **☺-Taste**, um das Gerät auszuschalten. Um die Zwischenmessergebnisse einer Dreifachmessung einzusehen, gehen Sie im Anschluss durch Drücken der **M-Taste** in den Messwertspeicher. Der 1. angezeigte Wert ist der Mittelwert der soeben durchgeführten Messung. Drücken Sie die **MAM / ☺-Taste**, um die Zwischenergebnisse 1-3 dieser Messung angezeigt zu bekommen und notieren Sie diese ebenfalls auf dem Dokumentationsbogen.

Stufen Sie abschließend den Mittelwert der Dreifachmessung gemäß der ABDA-Klassifizierungstabelle auf dem Dokumentationsbogen ein.

